

# Patienten Information

**Woulgan<sup>®</sup> Bioactive Beta-Glucan Gel** ist eine Behandlung für Wunden, die in der Heilung stagnieren, langsamer als gewöhnlich heilen oder ein hohes Risiko haben zu stagnieren. Woulgan<sup>®</sup> ist ein Gel mit einer einzigartigen Zusammensetzung mit Beta-Glucan, welches die stagnierende Wundheilung reaktiviert und den Heilungsprozess beschleunigt <sup>1, 2</sup>.

Es wird empfohlen die Behandlung mit Woulgan<sup>®</sup> zu beginnen, wenn nach 4 Wochen Standardbehandlung keine befriedigende Wirkung erzielt wird. Ein veröffentlichter Algorithmus legt nahe, dass bei weniger als 40% Heilung in vier Wochen ein anhaltendes Risiko besteht, dass die Wunde nicht heilt, wenn nicht ein Wechsel der Behandlung in Betracht gezogen wird <sup>3</sup>.

Ihr medizinisches Fachpersonal empfiehlt, auf Basis einer kompletten Begutachtung von Ihnen und Ihrer Wunde, **Woulgan<sup>®</sup> Bioactive Beta-Glucan Gel** für Sie als das angebrachteste Produkt.

## Achtung





- ◆ Effekt von Woulgan kann geringer sein bei Patienten, die mit immunsuppressiven Medikamenten und Steroiden behandelt werden
- ◆ Infektion; eine klinische Infektion sollte nach lokalen Standards behandelt werden, aber Woulgan kann begleitend zu antimikrobiellen Therapien angewendet werden

## Gegenanzeigen

- ◆ Bekannte Allergien gegenüber Bestandteilen des Woulgan

## Referenzen:

1. Can activation of body's own key cells in wound healing, wound macrophages, make a positive contribution in the treatment of chronic wounds? Ingrid Skjavelend and Rolf E Engstad, SÅR, volume 21 no 4.
2. Macrophage stimulating agent soluble yeast B-1,3/1,6-glucan as a topical treatment of diabetic foot and leg ulcers:
3. An evidence based algorithm for treating venous leg ulcers utilizing the Cochrane database of systematic reviews, Howard M Kimmel et al. WOUNDS. 2013;25(9):242-250.

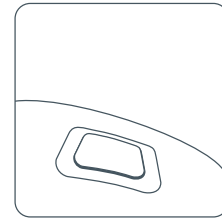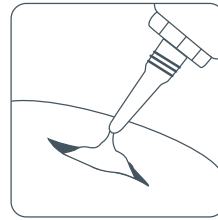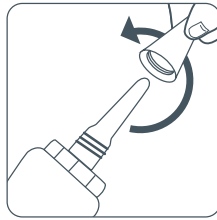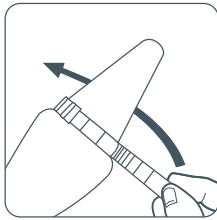

### Anwendung – In den meisten Fällen, wird dieses durch Ihr Pflegepersonal durchgeführt

- ◆ Wunde wie angewiesen reinigen
- ◆ Wundrand wenn nötig schützen
- ◆ Komplette Wunde mit einer dünnen Schicht Woulgan bedecken und mit einer Wundaufgabe nach Wahl abdecken
- ◆ Die angebrochene Tube Woulgan<sup>®</sup> muss verworfen werden
- ◆ Neues Woulgan bei jedem Verbandwechsel applizieren; in der Regel 2x wöchentlich
- ◆ Sicherstellen, dass alle anderen Aspekte der Pflege befolgt werden, z.B. Anwendung von Kompression oder passendes Schuhwerk

### Achten Sie auf diese klinischen Zeichen der Verbesserung:

- ◆ Saubererer Wundgrund
- ◆ Gesunderes Gewebe
- ◆ Verkleinerung der Wunde
- ◆ Weniger tiefe Wunde

Für klinische Fragen kontaktieren Sie bitte Ihr medizinisches Fachpersonal.

Für Fragen zum Woulgan<sup>®</sup> Bioactive Beta-Glucan Gel kontaktieren Sie bitte 0151 54794627.

### Behandlungszeitraum

- ◆ Ihr medizinisches Fachpersonal wird nach 4 Wochen Behandlung mit Woulgan<sup>®</sup> eine weitere Begutachtung vornehmen
- ◆ Wenn sich Verbesserungen einstellen, werden Sie bis zur Wundheilung oder für weitere 4 Wochen mit Woulgan behandelt, je nach dem, was zuerst eintritt
- ◆ Nach 8 Wochen wird empfohlen zur Standardbehandlung zurückzukehren
- ◆ Wenn die Heilung wieder stagniert, kann eine weitere 4-wöchige Anwendung mit Woulgan<sup>®</sup> gestartet werden. Weiter wie oben beschrieben...