

# Informasjon til pasienter





Woulgan<sup>®</sup> er et produkt for sakte og ikke-tilhelende sår. Det er en unik formulert gel som inneholder beta-glukan og reaktiverer stagnert tilheling og fremskyn-der tilhelingsprosessen.

Det anbefales i initiere behandling med Woulgan etter 4 uker med standardbehandling og når din lege vurderer at tilhelingsprosessen ikke er tilfredsstillende.

Din lege har valgt Woulgan som det mest passende produktet for deg etter en fullstendig vurdering av deg og såret.

## Hvordan påføre:

- ◆ Rens såret som angitt
- ◆ Beskytt sårkantene hvis aktuelt
- ◆ Dekk sårflaten med et tynt lag av Woulgan
- ◆ Påfør ny Woulgan hver gang bandasjen skiftes, vanligvis to ganger i uken
- ◆ Fortsett med tilleggsbehandlinger som kompresjon eller passende fottøy om det er foreskrevet

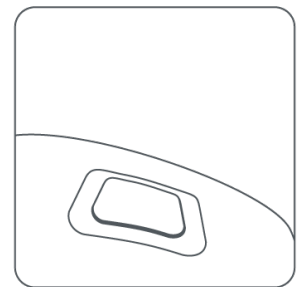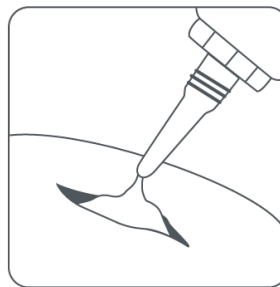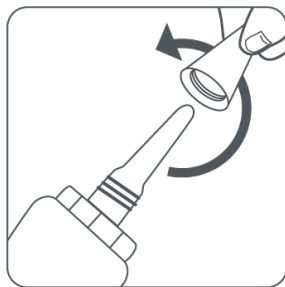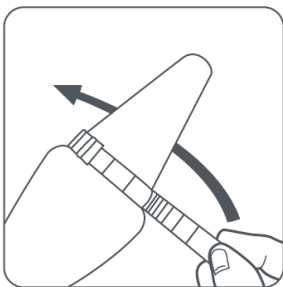

### Behandlingsperiode:

- ◆ Din lege vil gjøre en ny vurdering etter 4 ukers behandling med Woulgan og helhetlig behandling av din tilstand
- ◆ Hvis det er tydelige forbedringer kan behandling fortsette til såret et grodd, eller over en ny 4 ukers behandlingsperiode, avhengig av hva som kommer først
- ◆ Etter 8 uker med behandling anbefales det å returnere til standardbehandling
- ◆ Dersom tilheling stagnerer igjen, sett i gang en ny 4 ukersperiode med Woulgan behandling: Fortsett som ovenfor

### Observasjoner – dette er en normal del av tilhelingen:

- ◆ Sårvesking (væske som kommer fra såret) kan øke midlertidig
- ◆ Såret kan i en midlertidig periode lukte noe mer
- ◆ Såret og sårkantene kan bli rødere/rosa i en periode
- ◆ Hvis det finnes dødt vev i såret kan såret se større ut når dette fjernes ettersom vevet blir renere
- ◆ Mild kløe kan oppstå

### Observasjoner – ta kontakt med din lege om du opplever følgende:

- ◆ Huden rundt såret blir rødt og/eller varmt
- ◆ Lukt fra såret endres merkbart
- ◆ Fargen på såret endres merkbart (annet enn nevnt ovenfor)
- ◆ Alvorlig kløe oppleves (annet enn nevnt ovenfor)
- ◆ Smerter i såret endres merkbart

### Se etter disse kliniske forbedringene:

- ◆ Renere sårbunn
- ◆ Sunnere vev
- ◆ Reduksjon i dybde
- ◆ Reduksjon i størrelse

Ved kliniske spørsmål, vennligst kontakt din lege.

For spørsmål om **Woulgan<sup>®</sup> Bioactive Beta-Glucan Gel**, vennligst kontakt: 77648900

